


古井式 バイバルーンシヤント

頸動脈内膜剝離術用内シヤント

医療機器承認番号：15900BZZ01561000





2ウェイ
タイプ

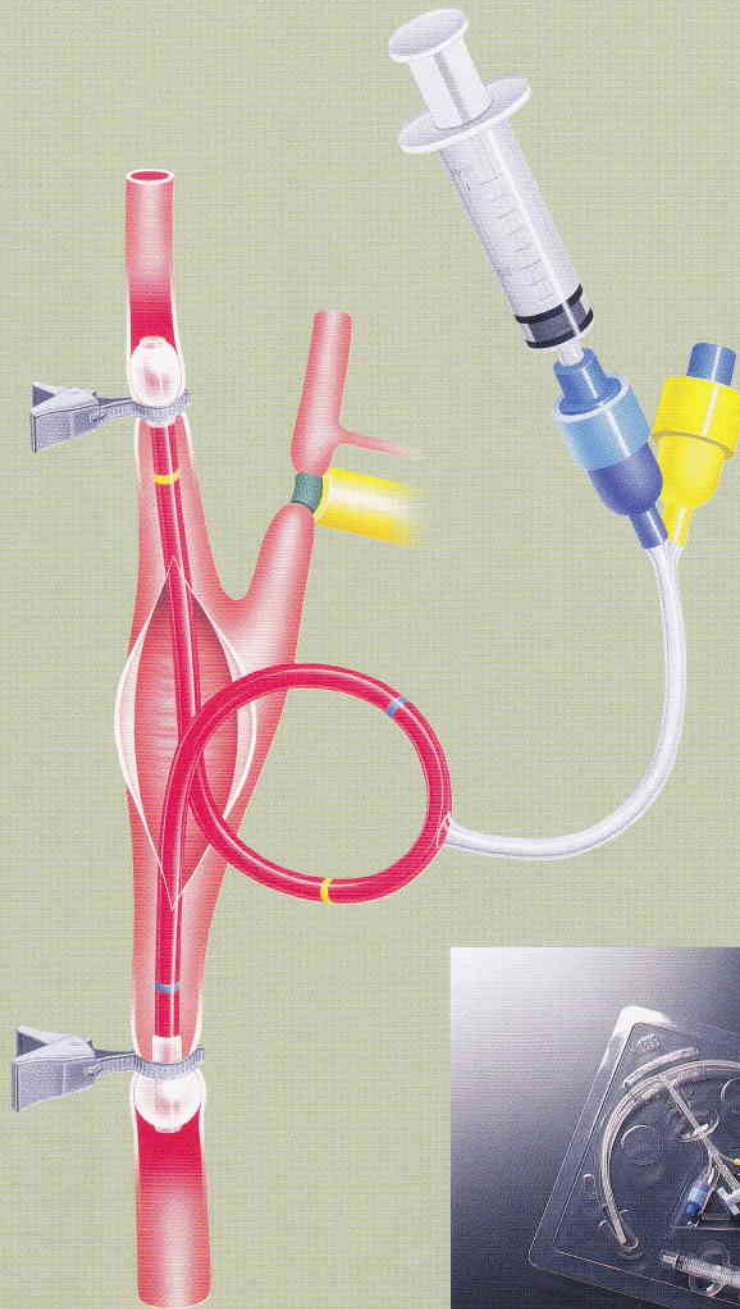

im INTER MEDICAL co.,ltd.
株式会社 インターメディカル

実用新案登録
第1652567号

シャント両端に個々独立して 膨縮自在なバルーンを設けることで、 従来のシャントに比べ次の利点があります。

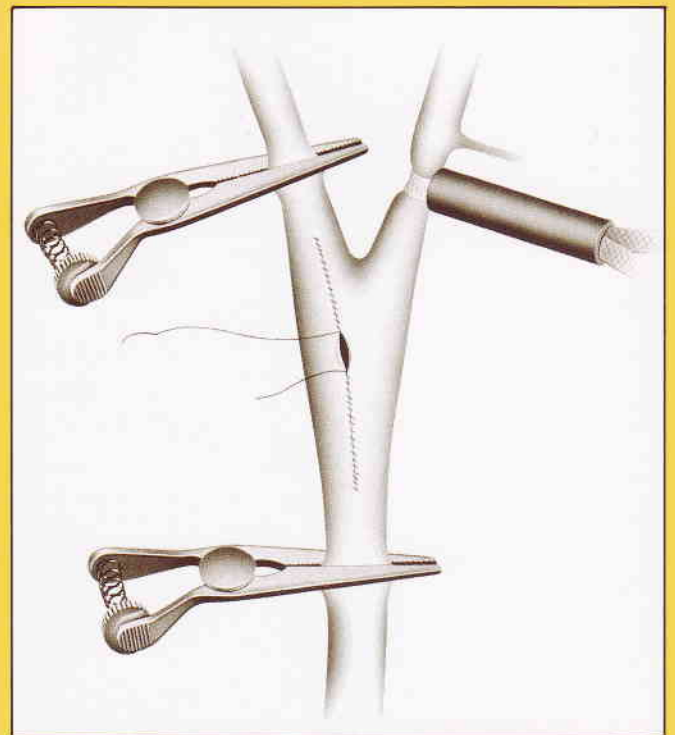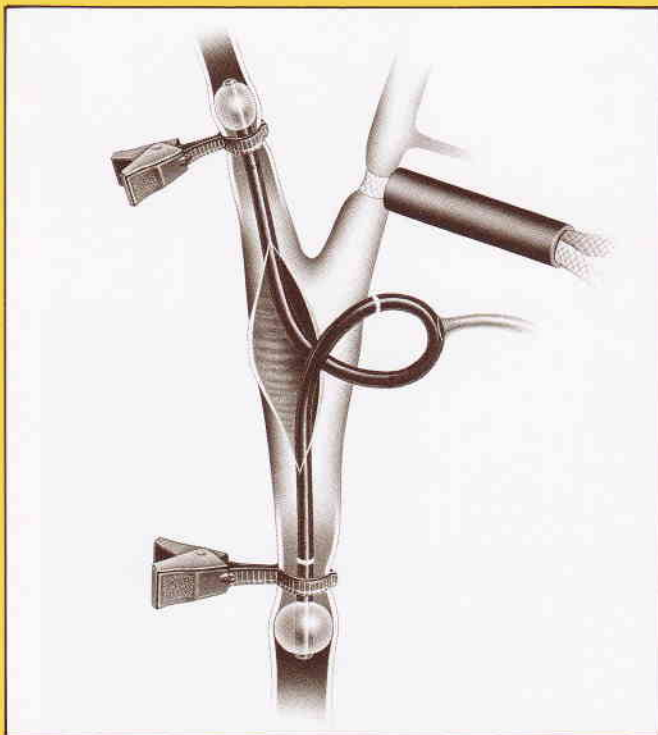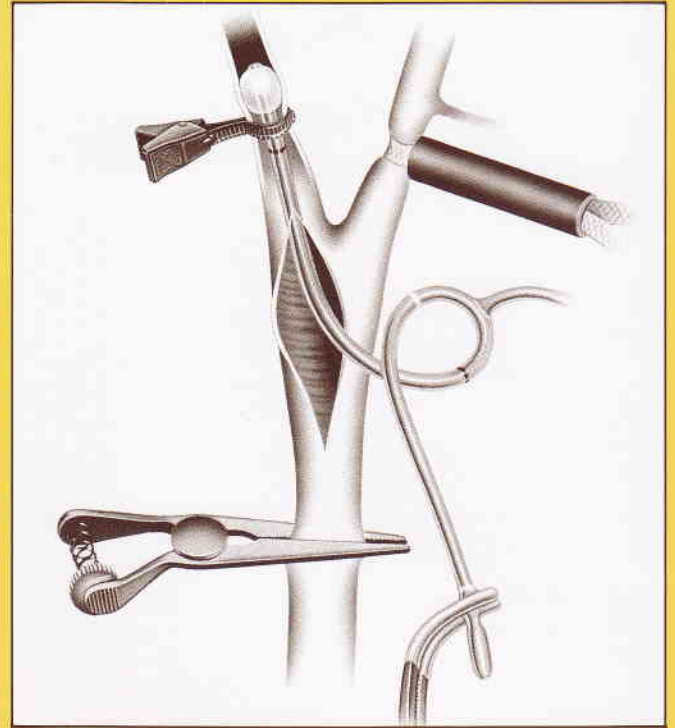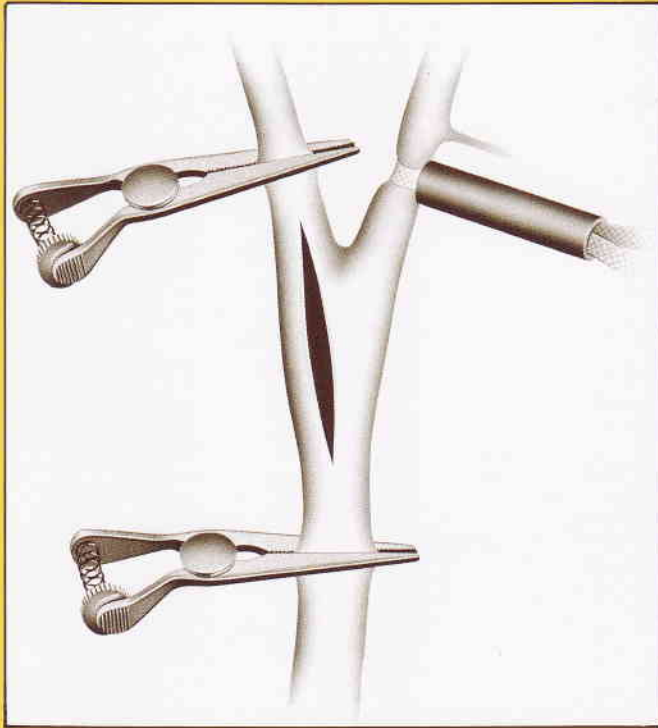

- サイズ 外 径：2.7mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm
バルーン長さ：10mm
長 さ：22cm, 30cm 医用シリコーン製品

特色

- バルーンを膨らませることにより、速やかな止血が可能です。
バルーンの生理食塩水注入にはスプリングバルブを使用しておりますので、ワンタッチでバルーンを膨らませられます。
- バルーンによって止血しますので、ターニケットを強く締めめる必要はなく、長時間の手術でも血管壁への損傷の心配がありません。専用バスキュークランプを使用すれば、より安全です。
- 頸動脈腔とシャントチューブのギャップを気にすることなく細いシャントを選択できるので、挿入が容易です。
- 細いシャントの選択は、血管内操作を容易にします。
- 病変部が高位の場合は、内頸動脈側のターニケットあるいは専用クランプを省略し、広い術野を確保することも可能です。



- 圧の測定など特殊な用途には3ウェイタイプをご利用下さい。

2ウェイ

モデルNO.	外径	長さ	モデルNO.	長さ
227-22	2.7mm	22cm		
230-22	3.0mm	22cm	230-30	30cm
235-22	3.5mm	22cm	235-30	30cm
240-22	4.0mm	22cm	240-30	30cm
245-22	4.5mm	22cm	245-30	30cm
250-22	5.0mm	22cm	250-30	30cm

3ウェイ


モデルNO.	外径	長さ	モデルNO.	長さ
330-22	3.0mm	22cm	330-30	30cm
335-22	3.5mm	22cm	335-30	30cm
340-22	4.0mm	22cm	340-30	30cm
345-22	4.5mm	22cm	345-30	30cm
350-22	5.0mm	22cm	350-30	30cm

バスキュークランプ

モデルNO.	サイズ
FV4	4.0 mm
FV5	5.0 mm
FV6	6.0 mm
FV7	7.0 mm
FV8	8.0 mm

クランプの特色

1. ターニケットと異なり締めつけによる血管損傷の可能性は殆どありません。
2. ワンタッチで装着でき、初心者でも容易に使用できます。
3. ターニケットに比べて術野の邪魔になりにくい。把手を血管軸に対して回転できます。

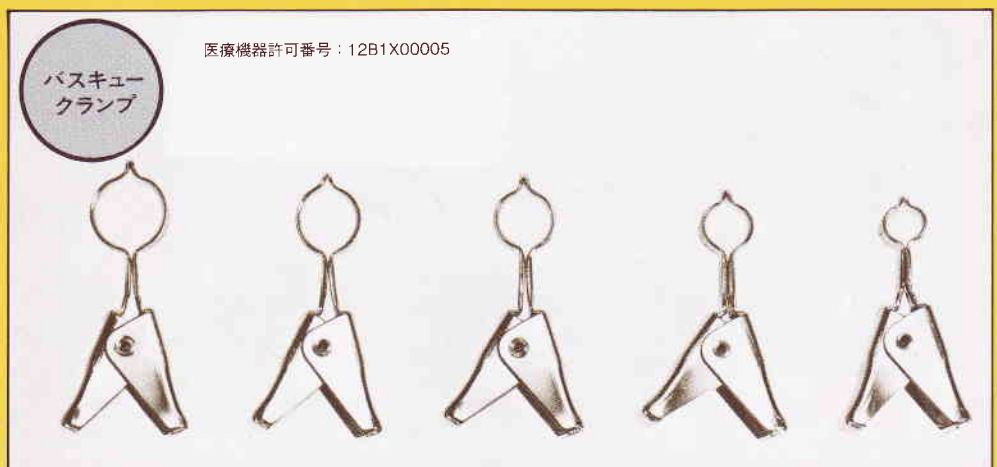

使用上注意

★使用前シャントチューブ内をあらかじめヘパリン水で洗浄して下さい。

★各バルーンの水最大注入量は下記の通りですのでご注意下さい。

※注意

外径	2.7mm	1.5ml	外径	4.0mm	3.0ml
	3.0mm	2.0ml		4.5mm	3.0ml
	3.5mm	2.5ml		5.0mm	3.0ml

術中使用の際は通常、総頸動脈側は0.5～0.9ml、内頸動脈側は0.2～0.5ml程度の注入で充分駆血の目的を達することができます。バルーン内の空気抜き(少量は残りますが差しかえありません)をかねて、あらかじめ膨らむ程度を調べるのがよいでしょう。

★血液流出を防ぐためシャントチューブ鉗子で挟む場合は、鉗子先端をラバーなどで保護したものか、ブルドック鉗子を使用して下さい。

★専用バスキュークランプは総頸動脈および内頸動脈の直径より、それぞれ1mm～2mm程度小さい内径のものを使用して下さい。

●参考文献

- 1) T. Furui J Neurosurg 60:861-863, 1984
- 2) 古井倫士, 手術38:219-221, 1984
- 3) T. Furui, Vasc Surg 22:38-40, 1988
- 4) T. Furui, Vasc Surg 24:656～658, 1990
- 5) S. Yamamoto, Neurol Med Chir 31, 104-108, 1991

総発売元

 **Inter Medical co.,ltd.**
株式会社 **インターメディカル**

<本社> 〒464-0850 名古屋市千種区今池三丁目40番4号
TEL (052) 731-8000(代) / FAX (052) 731-5050
website: <http://www.intermedical.co.jp/> E-mail: info@intermedical.co.jp

<大阪営業所> 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島三丁目19番13号 第2ユヤマビル4F-C
TEL (06) 6885-5300(代) / FAX (06) 6195-7337
E-mail: osaka@intermedical.co.jp

製造元 クリエイトメディック株式会社
横浜市都筑区茅ヶ崎南2-5-25

代理店